

# ANNEXE V

## **Ammoniaque** (adulte et enfant)

Analyse non fait sur plasma hémolysé (si hémolyse faire reprendre le prélèvement **et faire un rapport de non conformité**)

Tests : NH<sub>3</sub>

Sang (tube vert ) sur glace **L'unité de soins devrait appeler au laboratoire pour nous aviser du prélèvement.**

~~Envoi : CH Pierre-Legardeur. Laboratoire de Biochimie~~

**Le réactif doit être mis à bord de l'architect 5, calibre au besoin et passer des CQ aux 8 heures**

## **Réception du spécimen sur glace.**

- Centrifuger le plus tôt possible à 4<sup>0</sup> °C, (15 minutes maximum 30 ).
- **Remettre en STAT au personnel du laboratoire pour analyse.**
- ~~L'échantillon est ensuite congelé à -70°C.~~
- ~~Envoi de 1 à 1,5 cc de plasma sur glace sèche.~~
- ~~Expédier le plus tôt possible.~~

**Enfant envoyer le jour même:**

- ~~Tube vert sur glace~~
- ~~Centrifugé, décanté, congelé.~~

