ANNEXE W(v1)

Électrophores des protéines sérique Code SIL : EPROI

2 tubes necessaire; Code: EPROI sur poste de travail EPRON et Code EPROI sur poste de travail CHHIT Le tube CHHIT mesure la protéine sérique totale sur Architect, souvent les patients ont d'autres analyses de Biochimie sur ce tube.

Les envois du tube EPRON sont traités au Poste 3 de Biochimie et se font selon le mode « congelé»

Décanter dans des tubes Greiner 13x75 à bouchon Blanc Imprimer une étiquette pour apposer sur le formulaire destiné aux secrétaires.

Accumuler les tubes en ordre numérique en cours de journée en les espaçant dans un portoir au congélateur. Regrouper dans un portoir de carton à la fin de la journée

Préparer pour l'envoi les lundis et mercredi à HPLG dans des portoirs de 40 en carton. Les journées à la suite les unes des autres.

Placer le rack dans un sac Ziploc avec un papier absorbant. Sans requête

Immunofixation Code INF1

Les demandes de INF1 sont habituellement accompagnées d'un EPROI.

Des demandes d'immunofixation des protéines seule peuvent survenir. Dans ce cas, vérifiez au dossier du patient si une électrophorèse a été faite dans les 3 dernières semaines. Si c'est le cas, informatiser avec les codes AUFIX et IMMUN.

Joindre les tubes Immunofixation dans un Ziplock à part.

