

# Formation sur le lecteur de glycémie *Accu-Chek*<sup>®</sup> Performa



Laboratoire de biologie médicale  
CSSSNL


Version 2 (octobre 2020)

# Plan de la présentation

- Présentation Accu-Check Performa
- Opérateur
- Réactifs
- Contrôle de qualité (CQ)
- Test patient
- Interprétation des résultats
- Enregistrement des résultats
- Interférences analytiques
- Bris d'instrument
- Références

# Présentation Accu-Chek® Performa


- Lecteur de glycémie Accu-Chek® Performa.
- Contenant de 50 bandelettes réactives.
- Bouteilles de solution de contrôle de qualité (CQ).
- Lancettes (le modèle peut différer de l'image).

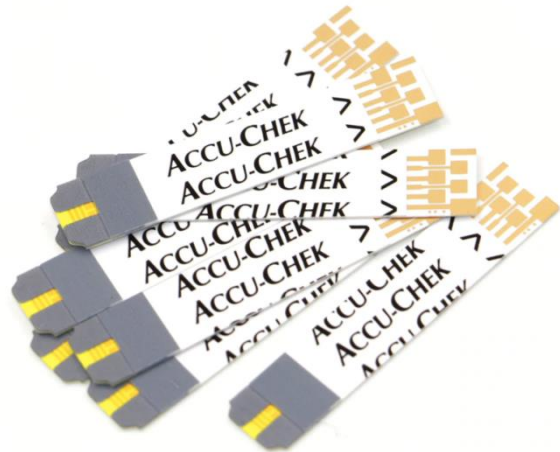

# Présentation Accu-Chek<sup>®</sup> Performa

- Utilisé comme appareil d'examen de biologie délocalisée (EBMD).
- Permet le dosage quantitatif de la glycémie sur du sang total capillaire.
- Méthode de dosage qui est l'ampérométrie : elle est différente de celle utilisée au laboratoire :
- **Utilité clinique** : Cette analyse permet le suivi des glycémies afin d'ajuster le traitement des patients.
- **Attention!** Cette analyse ne doit jamais être utilisée à des fins diagnostiques.

# ■ Glucomètre Accu-Chek<sup>®</sup> Performa

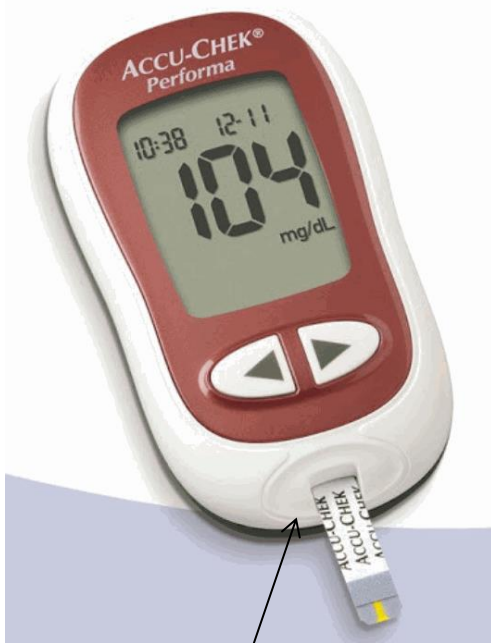

Port d'insertion  
bandelette



Bouton  
marche/arrêt



Port d'insertion de la  
puce de calibration

# Opérateur

Conformément aux normes ISO 22870 qui régissent les activités relatives aux Examens de Biologie Médicale Délocalisées (EBMD) :


- \* Il est obligatoire d'avoir une **certification active** : Une évaluation des connaissances réussie envoyée par le laboratoire une fois par année et une évaluation annuelle des compétences effectuée par le secteur des soins ;
- \* Il est obligatoire de pouvoir identifier le professionnel qui a effectué une analyse auprès d'un patient ;
- \* Les professionnels qui utilisent ces instruments ont la responsabilité de se conformer aux procédures d'utilisation établies, ainsi que d'exécuter les contrôles et les entretiens demandés ;
- \* Les professionnels qui utilisent ces instruments ont la responsabilité de compléter les registres et les formulaires fournis par l'établissement.

# Réactifs

## Bandelettes :

### Caractéristiques.

- Principe analytique : électrode.
- Chargement de l'échantillon : par capillarité.
- Volume d'échantillon requis : 0,6  $\mu$ L.
- Plage de lecture : 0,6 - 33,3 mmol/L.
- Délai pour générer le résultat : 5 secondes.
- La fenêtre jaune doit être complètement remplie (de sang ou de solution de CQ) en une seule tentative.

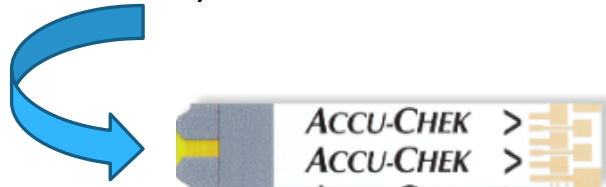

**Attention** : Ne pas réappliquer une deuxième goutte de sang sur une même bandelette.

# Réactifs

## Bandelettes :

- Format d'emballage: 50 bandelettes par contenant.
- Pot identifié d'un code à barres associé à un numéro de lot (unique dans tout le CISSS).



## Conditions de conservation :

- Uniquement dans leur contenant d'origine fermé hermétiquement (ne jamais transférer d'un contenant à un autre).
- Température entre 2°C - 30°C.
- Ne pas congeler (ex.: voiture l'hiver).

## Condition d'utilisation :

- La bandelette doit être utilisée dès sa sortie du flacon.
- Jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le flacon, indépendamment de la date d'ouverture.
- Entre 10°C et 40°C et entre 10% et 85% d'humidité.
- Les bandelettes ayant une date de péremption expirée doivent être jetées.

**Attention!** La puce de calibration contenue dans le pot doit être changée dans le lecteur si un nouveau lot de bandelettes est initié. Sinon, la jeter.



# Réactifs

## Lancettes :

### Conditions de conservation :

- Température de la pièce

### Condition d'utilisation :

- Jusqu'à la date d'expiration indiquée sur la boîte
- Usage unique
- Stérile
- Ne pas utiliser si le capuchon de sécurité est absent
- Disposer dans un contenant rigide biorisque pour objets piquants/tranchants



← Capuchon de sécurité

# Réactifs

## Contrôles de qualité :

### Conditions de conservation :

- Température comprise entre 2°C et 32°C
- Ne pas congeler

### Condition d'utilisation :

- Utiliser à température pièce.
- Jusqu'à la date d'expiration indiquée sur la boîte lorsque les contenants n'ont jamais été ouverts.
- Pour une gestion plus efficace du matériel de contrôle, les deux solutions doivent être ouvertes en même temps.

- **Les solutions devront être jetées 90 jours après l'ouverture des solutions.**
- **La date à laquelle les solutions doivent être jetées doit être inscrite sur les deux bouteilles de CQ.**



# Contrôler la qualité

## Quand passe-t-on des contrôles de qualité ? :

- Une fois par semaine.
- Chaque fois qu'une nouvelle boîte de bandelettes est ouverte.
- Lorsqu'on doute d'un résultat patient.
- À la réception d'un nouvel instrument ou d'un nouveau lot de solution de contrôle.
- En alternant les professionnels qui y procèdent si possible.

## À quoi ça sert?

- Permet de vérifier le fonctionnement de l'instrument.
- Permet de vérifier l'intégrité des bandelettes
- Permet de vérifier la technique de l'utilisateur

# Contrôler la qualité

## Procédure :

- S'assurer que les solutions de contrôle ACCU-CHEK performa (niveau bas et haut) sont à température pièce.
- S'assurer que les bouteilles de contrôle ne sont pas ouvertes depuis plus de 90 jours.
- Retirer une bandelette du contenant de bandelettes-test.
- Insérez la bandelette dans le glucomètre dans le sens des flèches. Le glucomètre se met en fonction.
- Assurez-vous que le code affiché à l'écran correspond aux 3 derniers chiffres du numéro de lot de bandelettes-test imprimé sur le flacon. Si vous n'avez pas vu le code, retirez la bandelette et réinsérez-la dans le glucomètre jusqu'à ce qu'il apparaisse.
- Posez le glucomètre à plat, sur une table (par exemple).
- Inverser 5 fois le flacon et jeter la première goutte du liquide de contrôle.
- Appliquer une goutte de contrôle du niveau 1 (bas) sur le **bord avant** de la fenêtre jaune de la bandelette. Un sablier clignote dès qu'une quantité suffisante de solution de contrôle ait été aspirée par la bandelette.

# Contrôler la qualité

- Le résultat s'affiche à l'écran en même temps que le symbole du flacon de solution de contrôle. Attendez pour retirer la bandelette.
  - \* Appuyer **une fois** sur la touche ► pour indiquer qu'il s'agit d'un résultat de **niveau 1**.
- Appuyer et relâcher la touche « ON/OFF » pour confirmer le niveau de contrôle.
- L'indication « OK » et le résultat de contrôle s'affichent à l'écran en alternance si le résultat se situe dans l'intervalle acceptable. L'intervalle des valeurs acceptables est imprimée sur l'étiquette du contenant de bandelettes-test ou tel que défini par le laboratoire.

# Contrôler la qualité

- Inscrire le résultat sur le registre «ADBD-REG-057 - Registre des contrôles de qualité pour glucomètre Accu-Chek Performa». Initialer et dater le registre.
- Retirer et éliminer la bandelette dans un sac pour les déchets biomédicaux.
- Refaire les étapes précédentes avec le niveau de contrôle 2 (haut).
  - \* Appuyer **deux fois** sur la touche ► si la solution de contrôle utilisée est de **niveau 2**.
- Appuyer et relâcher la touche « ON/OFF » pour confirmer le choix du niveau de contrôle.
- Une fois que le registre de contrôle de qualité est complété, vous devez le retourner au service de biochimie à l'attention du coordonnateur des examens de biologie médicale délocalisées (EBMD).

# Contrôler la qualité

## Interprétation :

- Si le contrôle échoue : l'indication « ERR » et le résultat de contrôle s'affichent à l'écran en alternance. Ceci signifie que le résultat du contrôle se situe à l'extérieur de la plage acceptable.
- Dans ce cas, noter la valeur obtenue dans le registre ADBD-REG-057 et cocher la case «refusé».
- Recommencer le contrôle avec une nouvelle bandelette-test.
- Si le contrôle échoue de nouveau, inscrire la valeur obtenue dans le commentaire de cette façon :  
**Exemple : Reprise Niveau 1 = 22,6 : Refusé**
- Si la reprise du contrôle est un succès, inscrire la valeur obtenue dans le commentaire de cette façon :  
**Exemple : Reprise Niveau 1 = 2,6 : Accepté**
- Lorsque les deux niveaux de contrôle sont acceptés, les tests patient peuvent être effectués.
- **Si le contrôle est toujours hors plage suite à la reprise, vous devez retirer le glucomètre du service :**
- Compléter le formulaire de réparation (ADBD-FOR-011).
- Acheminer l'appareil, le formulaire et le registre des contrôles au laboratoire à l'attention du coordonnateur EBMD.

# Contrôler la qualité

## Registre du contrôle de qualité : ADBD-REG-057 : registre de contrôle de qualité pour glucomètre Accu-Chek Performa

Centre intégré de santé et de services sociaux Québec

REGISTRE DE RÉSULTATS DU CONTRÔLE DE QUALITÉ  
GLUCOMÈTRES ACCU-CHEK PERFORMA

ADBD-REG-057  
Version 005  
Statut : Active

AVRIL ET MAI 2020

Motivation pour initier un contrôle de qualité (ADBD-PON-038)		Conservation du contrôle de qualité :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois par semaine (A)</li> <li>• À chaque fois que vous ouvrez une nouvelle boîte de bandelettes (B)</li> <li>• Lorsque l'on doute du résultat obtenu (C)</li> <li>• À la réception d'un nouvel appareil (D)</li> <li>• À la réception du nouveau lot de contrôle (E)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conserver entre 4 et 30°.</li> <li>- Mettre l'étiquette « jeter le » sur chacun des flacons de contrôle stables 90 jours après l'ouverture.</li> <li>- Jeter la première goutte de solution avant utilisation.</li> <li>- Bien fermer le flacon après son utilisation.</li> </ul>	

# Série du glucomètre : # \_\_\_\_\_ Unité : \_\_\_\_\_

Solution de contrôle : ACCU-CHEK PERFORMA CONTROL Numéro de lot : 90100399 Date de péremption : 2021-02-28  
Bandelettes : ACCU-CHEK Performa Numéro de lot : 478529 Date de péremption : 2021-04-30

Date : Semaine du :	Raison du CQ : entrer la qui lettre correspond à la motivation du CQ	Niveau 1 Cible : 1.7 à 3.3 mmo/L *	Niveau 2 Cible : 14,5 à 19,6 mmol/L *	Accepté (cocher)	Refusé (cocher) **Action corrective obligatoire	Signature # employé Commentaire Documenter l'action corrective si nécessaire
29-03-20 au 04-04-20						
05-04-20 au 11-04-20						
12-04-20 au 18-04-20						
19-04-20 au 25-04-20						
26-04-20 au 02-05-20						
03-05-20 au 09-05-20						
10-05-20 au 16-05-20						
17-05-20 au 23-05-20						

Une fois par deux mois, vous recevrez ce registre à compléter avec les résultats de CQ que vous aurez obtenus.

Les contrôles doivent être effectués une fois par semaine ET dans les autres conditions tel que mentionné sur le registre.



# Contrôler la qualité

## Les causes d'erreurs les plus fréquentes

- ✓ Solutions de contrôle ou bandelettes expirées.
- ✓ Solution non mélangées avant l'analyse.
- ✓ Bec verseur souillé (ex. glucose cristallisé → **Jeter la première goutte**).
- ✓ Inversion des niveaux de CQ.
- ✓ Évaporation ( fioles mal fermées).
- ✓ Conditions de conservation (bandelettes ou CQ) non-respectées (ex.. T°).

# Test patient

Obtenir le consentement éclairé du patient avant de procéder à l'analyse.

Pour effectuer une mesure de la glycémie avec un glucomètre, il faut s'assurer d'avoir une ordonnance médicale qui autorise l'analyse.

Confirmer l'identité du patient par une double identification.

Exemple : demander son nom, prénom et sa date de naissance, ou vérifier son numéro de dossier ainsi que sa RAMQ.

Pendant l'analyse, l'utilisateur doit protéger la vie privée et la confidentialité du patient.

Vérifier la péremption et l'intégrité du matériel et réactifs utilisés.

Si périmés, détériorés, inappropriés ou s'ils ne correspondent pas aux critères de qualité, les mettre au rebut selon les règles de l'établissement.

Retirer une bandelette du contenant de bandelettes-test.

# Test patient

Insérer la bandelette dans le port d'insertion de bandelettes du glucomètre, dans le sens des flèches. Le glucomètre s'allume.

Vérifier que le numéro de lot inscrit sur l'écran soit identique à celui imprimé sur le contenant de bandelette. Si le code n'apparaît pas, retirer la bandelette et la réinsérer dans le glucomètre.

Le symbole clignotant d'une bandelette et d'une goutte de sang s'affichent à l'écran.

Laver les mains du patient avec du savon et de l'eau et bien assécher. Si le nettoyage est fait avec un tampon d'alcool, assécher le site de ponction avec une compresse.



un site de ponction sur le côté palmaire de l'extrémité du l'annulaire (doigts à privilégier lorsque possible).

ndiculairement au sens des empreintes digitales.

Essuyer la première goutte de sang.

# Test patient

Mettre la deuxième goutte de sang en contact avec le **bord avant** de la fenêtre jaune de la bandelette. S'assurer que la fenêtre jaune de la bandelette réactive soit remplie d'un seul coup.

Un sablier clignote dès qu'une quantité suffisante de sang a été aspirée par la bandelette.

Le résultat s'affiche à l'écran. Retirer la bandelette et jeter selon la politique en vigueur.

S'il s'agit d'un patient en externe (ressource intermédiaires), inscrire le résultat au «Formulaire de suivi pour glycémies capillaires par des aides-soignants (LN0770)». Y consigner la date et l'heure de l'analyse, le nom du patient et le résultat de l'analyse.

S'il s'agit d'un patient admis (hôpital), consigner le résultat au formulaire LN0188 : «Résultats de glycémie capillaire».

# Test patient

Consigner le résultat sur le formulaire fourni par le laboratoire si c'est un contrôle de qualité externe ou une corrélation.

Une fois l'analyse effectuée avec succès, le glucomètre s'éteint automatiquement cinq secondes après le retrait de la bandelette.

Nettoyer la surface extérieure avec une lingette germicide humide en prenant soin de ne pas introduire de liquide dans le port d'insertion de bandelettes.

# Test patient

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de Lanaudière

Québec 



Formulaire LN0188 :  
Soins infirmiers

## RÉSULTATS DE GLYCÉMIE CAPILLAIRE

Installation : \_\_\_\_\_

Sites d'injection	Bras	Cuisse	Abdomen		Types d'insuline (1)
Déjeuner			X	T	Toronto
Dîner	X			HR	Humulin R
Souper	X			N	NPH
HS		X		HN	Humulin N
				Hg	Lispro (Humalog)
				U	Ultralente

# Test patient

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
de Lanaudière

Québec



L N 0 7 7 0

Formulaire LN0770 :  
aides-soignants

## PLAN – NON PROF. SUIVI GLYCÉMIE

### PLAN DE TRAVAIL

Formulaire de suivi pour glycémie capillaire par des aides-soignants

INSTALLATION : \_\_\_\_\_ NO DOSSIER CLSC : P : \_\_\_\_\_

DOMICILE

RÉSIDENCE PRIVÉE

Date aaaa/mm/jj	MATIN				MIDI				SOIR				COUCHER			
	hre	Résultat	Insuline	Init.	hre	Résultat	Insuline	Init.	hre	Résultat	Insuline	Init.	hre	Résultat	Insuline	Init.

# Test patient

**Valeurs de référence:** se référer à vos protocoles thérapeutiques.  
**Valeurs de référence (à jeun) pour la méthode du laboratoire.**

Populations	Résultats glycémie (mmol/L)
0 à 1 jour	2,2 - 3,3
2 jours à 14 jours	2,8 - 4,4
15 jours à < 12 ans	3,3 - 6,0
12 ans à < 60 ans	3,9 - 6,0
60 ans à < 70 ans	4,4 - 6,0
70 ans et plus	4,6 - 6,0



# Test patient

- La plage de mesure des glucomètres est étendue entre 0,6 - 33,3 mmol/L.
- Les valeurs situées à l'extérieur de cette plage sont affichées de cette façon :

« **HI** » ( $> 33,3$  mmol/L) ou « **LO** » ( $< 0,6$  mmol/L)

Si le lecteur indique HI ou LO, c'est que le résultat est à l'extérieur des limites de lecture de l'instrument.

Il faut :

1. Reprendre la glycémie capillaire selon la procédure en utilisant un autre site de ponction.
2. Si le résultat se répète, le résultat doit être contrôlé par une analyse de glycémie au laboratoire.
3. Suivre le protocole de soins et appeler le médecin traitant.
4. Prélever un tube gris par ponction veineuse et l'acheminer en stat au laboratoire.

# Test patient

**Attention! Une valeur critique ne doit jamais passer inaperçue.  
Agir immédiatement car la vie du patient est potentiellement en danger.**

Populations	Valeur Critique Basse (mmol/L)	Valeur Critique Élevée (mmol/L)
Nouveau-nés (0- 7 jours)	$\leq 1,7$	$\geq 18$
Adultes	$\leq 2,2$	$\geq 26$

## Marche à suivre :

Si le résultat est  $\leq$  à 2,2 mmol/L ou  $\geq$  à 26 mmol/L, c'est une **valeur critique** (« panique »). Il faut :

- Reprendre la glycémie capillaire selon la procédure en utilisant un autre site de ponction.
- Si le résultat se répète, le résultat doit être contrôlé par une analyse du glucose en laboratoire.
- Suivre le protocole de soins et appeler le médecin traitant.
- Prélever un tube gris par ponction veineuse et l'acheminer en stat au laboratoire.

# Interprétation des résultats

Si un résultat est douteux en discordance avec la présentation clinique du patient, faire:

- ✓ Un prélèvement veineux  $\leq 5$  minutes suivant la glycémie capillaire et l'envoyer immédiatement au laboratoire (selon ordonnance collective ou après avoir obtenu l'autorisation du médecin ou de l'infirmière).
- ✓ **En cas de discordance des résultats, toujours se fier à celui rapporté par la laboratoire.**
- ✓ Refaire un CQ (niveau 1 et niveau 2) avec le même glucomètre afin de contrôler l'instrument.

# Interprétation des résultats



Erreurs potentielles associées à l'état de la bandelette

Erreurs	Conseils
<b>Contenant de bandelettes réactives trouvé sans bouchon ou mal fermé.</b>	Jeter le contenant de bandelettes réactives.
<b>Bandelettes réactives trouvées hors de leur contenant.</b>	Jeter les bandelettes réactives.
<b>Température de conservation des bandelettes réactives inadéquate.</b>	Ne jamais entreposer les bandelettes réactives sur le bord d'une fenêtre ou près d'un élément de chauffage. Assurez-vous de les conserver entre 2°C et 30°C.



# Interprétation des résultats

## Erreurs potentielles associées au prélèvement/échantillon

Erreurs	Conseils
<b>Contamination de l'échantillon par l'alcool.</b>	Laisser sécher complètement l'alcool à l'air ou assécher avec une compresse et essuyer la première goutte du prélèvement.
<b>Contamination de l'échantillon par du liquide interstitiel</b> (pression excessive pour obtenir une goutte de sang).	Assurer un flux sanguin adéquat: réchauffer le doigt, pendre le bras ou appliquer une légère pression sur la paume de la main.
<b>Contamination de l'échantillon par une autre substance</b> (ex.. main sale, crème à main).	Bien nettoyer et sécher le site de ponction.
<b>Goutte de sang insuffisante</b>	Toujours s'assurer que la fenêtre jaune soit complètement remplie. Si ce n'est pas le cas, refaire le test avec une nouvelle bandelette réactive.

# Enregistrement des résultats

- Le résultat doit être transcrit sur le formulaire conçu à cet effet et réservé aux résultats d'EBMD : consigner sur le formulaire la date et l'heure de l'analyse, le nom du patient et le résultat de l'analyse.
- S'il s'agit d'un patient admis, documenter le résultat au dossier du client avec le formulaire LN0188.
- S'il s'agit d'un patient externe en ressource intermédiaire, documenter le résultat au dossier du client avec le formulaire LN0770
- Documenter le résultat sur le formulaire fourni par le laboratoire si c'est un contrôle externe ou une corrélation.



# Interférences analytiques

- Des interférences analytiques peuvent créer de faux résultats :
  - Galactose > 0.83 mmol/Lol/L
  - Acide ascorbique > 0.17 mmol/Lol/L (par IV)
  - Hématocrite < 10% ou > 65%
  - Triglycérides > 20.3 mmol/Lol/L
  - Utilisation de N-Acétyl-cystéine traitement antidote de l'intoxication à l'acétaminophène

N.B.: Si la situation est connue, ne pas utiliser le lecteur de glycémie, faire un prélèvement veineux (glucose) selon l'ordonnance médicale et l'acheminer au laboratoire. Si l'ordonnance collective ne s'applique pas, aviser le médecin traitant ou l'infirmière.

- L'application d'une 2<sup>ème</sup> goutte de sang (ou de solution de contrôle) sur une bandelette précédemment souillée d'une 1<sup>ère</sup> goutte insuffisante générera un résultat erroné.




# Interférences analytiques

- **Facteurs reliés à l'état du patient.**
  - État hyperglycémique-hyperosmolaire (avec ou sans cétose).
  - Déshydratation, hypotension ou état de choc.
  - Hématocrite > 70% (0,70).
  - Déshydratation grave.
  - Maladie artérielle occlusive périphérique.
  - Tous les états affectants la circulation périphérique.
- **Marche à suivre si la situation est connue (ou en cas de doute).**
  - Ne pas utiliser le glucomètre pour mesurer la glycémie.
  - Faire un prélèvement veineux (glucose) et l'acheminer au laboratoire selon l'ordonnance collective 4,28.
  - Si l'ordonnance collective ne s'applique pas, aviser le médecin traitant ou l'infirmière.



# Bris d'instrument

- Acheminer le glucomètre défectueux au laboratoire de Biochimie à l'attention du coordonnateur EBMD.
- Compléter et joindre le formulaire : **ABBD-FOR-011 FORMULAIRE DE RÉPARATION D'UN APPAREIL ABBD DÉFECTUEUX**. Ce formulaire est disponible à partir d'intranet et internet.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière  
Québec  **ABBD-FOR-011 FORMULAIRE DE RÉPARATION D'UN APPAREIL ABBD DÉFECTUEUX**  
(NE S'APPLIQUE PAS AUX GLUCOMÈTRES ACCU-CHEK INFORM II) VERSION-3

À COMPLÉTER CHAQUE FOIS QU'UN APPAREIL EST DÉFECTUEUX ET DOIT ÊTRE RETOURNÉ AU LABORATOIRE  
**SAUF POUR LES GLUCOMÈTRES ACCU-CHEK INFORM II ON DOIT COMPLÉTER LE REGISTRE DE VERIFICATION DU GLUCOMÈRE ET LE RETOURNER AU GBM**

Sections A et B à compléter à l'unité de soins

Section A Description de l'appareil défectueux	
Nom de l'utilisateur :	Date :
Accu-chek Performa : <input type="checkbox"/>	Numéro de série (code barre):  Numéro du GBM :
Appareil à gaz <input type="checkbox"/>	
Bilirubinomètre <input type="checkbox"/>	
Hemocue hb 201* <input type="checkbox"/>	
Unité de soins :	Tél : et/ou poste
Date et heure de l'apparition du problème (obligatoire) :	
Inscrire message apparaissant à l'écran, s'il ya lieu:	
Description du problème : (obligatoire)	

# Références

## Où trouver la documentation sur l'Accu-Chek Performa ?

- Sur l'intranet du CSSSNL dans la section → info cliniques → Laboratoires → Laboratoire Nord → Analyses de laboratoires délocalisées (ADBD) → glucomètre *Accu-Chek*<sup>®</sup> Performa.
- Sur le site internet du centre hospitalier à l'adresse :  
<http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/professionnels-de-la-sante>
- Contacter votre super-utilisateur
- Contacter le coordonnateur des EBMD au (450)759-8222 poste 2285

# Références

Aller dans Intranet section : **INFO CLINIQUES** → **LABORATOIRES** → **LABORATOIRES NORD** → **ANALYSES HORS LABO (ADBBD)** →

The screenshot shows a web browser window displaying the intranet of the Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. The page title is "Laboratoire Nord". The navigation menu includes "Accueil", "Plan du site", "Nous joindre", and "Portail Québec". The main navigation bar contains "CISSS en bref", "Conseils professionnels", "Info administrative", "Info clinique", "Info RH", "Gestionnaires", and "Documentation". The breadcrumb trail is "Accueil / Info clinique / Laboratoires / Laboratoire - Nord". The left sidebar shows a tree structure under "Laboratoires" with "Laboratoire - Nord" selected, and "Analyses de laboratoires délocalisées (ADBBD)" highlighted. The main content area is titled "Laboratoire Nord" and contains the following text:

Le département de biologie médicale est un département du Centre hospitalier régional De Lanaudière, situé au 1000 boulevard Ste-Anne, St-Charles Borromée, J6E 6J2.

Les services **d'hématologie, de biochimie, de microbiologie et de banque de sang et coagulation** sont situés au sous-bassement de l'aile A.

Les services **d'anatomopathologie et de cytologie** sont situés au premier étage (1F) et la salle d'autopsie est située au SS-F-15.

Le centre de prélèvement des polycliniques du CHRDL pour la clientèle requérant un prélèvement effectué à notre établissement est situé au rez-de-chaussée (RC-F).

Les centres de prélèvements pour l'ensemble de notre clientèle sont répartis dans chacune des MRC du territoire Lanaudière nord. Veuillez les contacter afin d'en connaître la localisation précise et les heures d'ouvertures.

Cette section offre aux utilisateurs et à la clientèle différents outils leur permettant :

- D'obtenir les informations nécessaires des différentes analyses offertes par le laboratoire du Nord de Lanaudière;
- De contacter les personnes ressources appropriées selon les besoins;
- De consulter des documents de formations concernant le laboratoire.

Ainsi, le département de biologie médicale effectue les analyses et fournit des résultats d'analyses de qualité, précis et exacts dans les meilleurs délais.

# Références

Aller dans Internet section : **Professionnels** → **Biologie médicale (Laboratoires)** → **Biologie médicale NORD** → **Examens de Biologie Médicale Délocalisées (EBMD)**



The screenshot shows the Québec.ca website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for "Québec.ca", "Nous joindre", "English", "Employés", "Professionnels", and "Partenaires". Below this is a dark blue navigation bar with links for "Votre CISSS", "Liste de soins et services", "Carrières", and "Documentation". The main content area is titled "Ressources pour les professionnels" and lists several categories: "Accueil clinique", "Biologie médicale (laboratoires)", "Chirurgie bariatrique", "Clinique de la gestion de la douleur", and "Coronavirus". Two arrows point to the "Employés Professionnels Partenaires" link and the "Biologie médicale (laboratoires)" category.

Québec Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Québec.ca Nous joindre English Employés Professionnels Partenaires

Votre CISSS Liste de soins et services Carrières Documentation

Accueil / Professionnels de la santé / Ressources pour les professionnels

Ressources pour les professionnels

Informations nouveaux médecins de famille

- Accueil clinique
- Biologie médicale (laboratoires)
- Chirurgie bariatrique
- Clinique de la gestion de la douleur
- Coronavirus

# AVERTISSEMENT

- \* **Il est interdit de reproduire ce document en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite du CSSSNL. Toute demande à cet effet doit être acheminée au département de biologie médicale.**